

medical line



ORLETT

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению
ортопедических изделий

РЕКЛИНАТОР ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ

CS-150

WWW.ORLETT.RU

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Реклинатор Orlett, арт. CS-150, фиксирует (компенсирует недостаточность связочного аппарата) плечевые суставы в положении отведения кзади (реклинация), частично или полностью снимает напряжение мышц ключичной области, оказывает незначительное реклинирующее воздействие (отведение) на область верхнегрудного отдела позвоночника, уменьшает объем движения лопаток. Отпускается без рецепта.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- состояния после травм ключицы при консервативном лечении на всех сроках реабилитации;
- состояния после оперативного лечения травм ключицы;
- нарушения осанки и искривления верхнегрудного отдела позвоночника;
- заболевания и состояния, связанные с необходимостью отведения или фиксации плечевых суставов;
- повреждения и заболевания акромиально-ключичного сочленения;
- остеопороз, остеохондроз верхнегрудного отдела позвоночника, спондилопатии легкой степени.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения реклинатора назначает лечащий врач.

Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения реклинатора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Людам, имеющим заболевания кожи, перед использованием реклинатора необходимо проконсультироваться с врачом.

Людам с чувствительной кожей следует надевать реклинатор на натуральное белье, плотно прилегающее к телу.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

КОНСТРУКЦИЯ

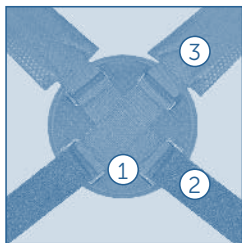

Цифры соответствуют следующим элементам конструкции:

1. пелот;
2. фиксирующие наплечные ремни с трехлепестковой застежкой-липучкой велкро;
3. мягкие муфты.


ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Реклинатор надевать непосредственно на тело или на майку.

1. Круглый пелот наложить на межлопаточную область.
2. Фиксирующие ремни продеть в пряжки, расположенные в пелоте.
3. Наплечные ремни натянуть и зафиксировать с помощью застежек-липучек велкро в положении, обеспечивающем разведение плеч.



ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРА

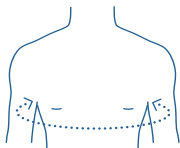

Размер	Окружность грудной клетки, см
S/M	до 100
L/XL	более 100

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить изделие. Важно, чтобы реклинатор был удобен.

СОСТАВ

40% полиэстер, 30% полиамид, 15% полиуретан, 13% этиленвинилацетат, 2% эластан.

ПРАВИЛА УХОДА

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Реклинатор должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Реклинатор утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования реклинатора дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования реклинатора без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции реклинатора. Не допускается эксплуатация поврежденного реклинатора.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. CS-150, инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09549 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.МЕ20.Д01699 (с 26.06.2014 г. по 15.04.2017 г.) выдана органом по сертификации «Сертинформ ВНИИНМАШ».

Производитель: Рехард Технолджис ГмБХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамерштрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

