

energy line



**ORLETT**

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению  
ортопедического изделия

**ELBOWFLEX PLUS**  
**БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ**

**DEL-104**

[WWW.ORLETT.RU](http://WWW.ORLETT.RU)

**PROPRIOPRESSION®** – инновационная зарегистрированная технология вязки из уникальных материалов, обеспечивающая доказанное усиление проприоцепции (мышечного чувства) и ощущения защищенности сустава. Эффект достигается за счет идеально точного прилегания ортезов и медицинской дозированной поддержки суставов. Естественный термо- и влагообмен, микро-массажный эффект в зоне нагрузок ускоряют восстановление и обеспечивают исключительный комфорт при любой активности. Усиление проприоцепции в ортезах **ORLETT Energy Line**, изготовленных по технологии **PROPRIOPRESSION®**, протестировано и подтверждено ведущими медицинскими научно-исследовательскими центрами.

## КОНСТРУКЦИЯ И СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

### ВЯЗКОЭЛАСТИЧНЫЕ ВСТАВКИ В ОБЛАСТИ НАДМЫШЦЕЛКОВ

- Равномерно распределяют нагрузку на надмышцелки
- Предотвращают патологические нагрузки на мышцы и сухожилия
- Снимают болевой синдром
- Ускоряют процесс выздоровления

### ФИКСИРУЮЩИЙ РЕМЕНЬ

- Фиксирует сухожилия, предотвращает возникновение болевых ощущений во время движений

### ПЛОСКАЯ ТРЕХМЕРНАЯ ВЯЗКА

- Обеспечивает максимальное анатомическое прилегание
- Стабилизирует и разгружает сустав
- Распределяет компрессию по всей длине бандажа, снижая её к краям
- Обладает противоотёчным действием
- Сохраняет нормальное кровообращение, не создает эффект «жгута»



## **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

---

- вторичная реабилитация после травм и операций на локтевом суставе;
- эпикондилиты (медиальный «локоть гольфиста», латеральный «локоть теннисиста»);
- бурситы локтевого сустава;
- воспалительно-дегенеративные заболевания локтевого сустава, в т.ч. сопровождающиеся болевым и отечным синдромами;
- тендомиопатии;
- профилактика травм локтевого сустава, в т.ч. в спорте.

## **РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ**

---

Режим и сроки ношения назначает лечащий врач.

Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

## **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

---

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойно-септические заболевания кожных покровов в области применения изделия.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

---

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего использования изделия.

## **ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ**

---

Бандаж натянуть на локтевой сустав так, чтобы вязкоэластичные вставки расположились в области надмыщелков плечевой кости (косточки, выступающие снаружи и изнутри в области локтевого сустава).

## ПРАВИЛА ПОДБОРА



Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измеряется окружность локтевого сустава.

Согласно полученным результатам подобрать бандаж по таблице подбора размеров.

## ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	Окружность локтевого сустава, см
S	20-23
M	23-27
L	27-30
XL	30-32
XXL	32-35

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить изделие. Важно, чтобы бандаж был удобен.

## ПРАВИЛА УХОДА

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.



## СОСТАВ

38,7% полиамид, 7,2% эластан, 3,4% полиэстер, 2,4% термопластичный полиуретан, 48,3% силикон.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

---

Бандаж должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

## **УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ**

---

Бандаж утилизировать с бытовым мусором.

## **СРОК ГОДНОСТИ**

---

Срок годности не установлен.

Возможность использования бандажа дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования бандажа без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции бандажа. Не допускается эксплуатация поврежденного бандажа.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

## **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

---

Ортопедическое изделие арт. DEL-104, инструкция по применению.

## **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК**

---

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

## **ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ**

---

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА  
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09551 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д74409 (с 12.04.2017 г. по 12.04.2020 г.) выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию».

**Производитель:** Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамерштрассе, 92.

**Импортер:** ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

**Претензии направлять:** Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.



